

FICHA TÉCNICA
AQUACEL™ FOAM (ADHESIVO)
PROVEEDOR: BOSTON MEDICAL DEVICE DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.

PRODUCTO	
Nombre genérico	Apósito de espuma de Hydrofiber™ y adhesivo de silicón.
Nombre comercial	Aquacel™ Foam (Adhesivo).
Registro sanitario	0399C2013 SSA
Uso	Aquacel™ Foam (Adhesivo) se puede utilizar como apósito primario, secundario; se puede usar solo o en combinación para el cuidado de las heridas agudas o crónicas como son: abrasiones menores, laceraciones, cortadas menores, escaldaduras y quemaduras menores, así como en heridas crónicas; úlceras en la pierna, heridas quirúrgicas, quemaduras de grosor parcial (segundo grado) etc.
Presentaciones	420680 – 10x10 cm (Cj x10) 420619 – 12.5x12.5 cm (Cj x10) 420621 – 17.5x17.5 cm (Cj x10) 420623 – 21x21 cm (Cj x5) 420624 – 25x30 cm (Cj x5) 420625 – 19.8-14 cm (Cj x5) 420626 – 20x16.9 cm (Cj x5)
Composición del producto	Los Aquacel™ Foam (Adhesivo) constan de una película exterior de poliuretano impermeable y una almohadilla de capas múltiples absorbentes; contiene una capa de espuma y una capa no tejida con la tecnología hidrofibra.
Descripción	Los Aquacel™ Foam (Adhesivo) constan de una película exterior de poliuretano impermeable y una almohadilla de capas múltiples absorbentes.
Marca	ConvaTec.
Fabricante	Convatec Inc.
Características y acciones del producto	Alta absorción, retención efectiva y gran capacidad de manejo de fluidos. Balance efectivo de humedad (alta transmisión de vapor de humedad en combinación con la hidrofibra). Absorción lateral controlada (previene maceración). Bajo coeficiente de fricción y barrera protectora. Bajo potencial de irritación dérmica o alergias.
Recomendaciones	<ul style="list-style-type: none"> • Se recomienda leer el instructivo de aplicación disponible en el empaque antes de su aplicación. • Seleccionar tamaño y forma adecuados (almohadilla 1cm mayor que el área de la herida). • Retirar el apósito del empaque estéril, minimizando el contacto de los dedos. • Alinear el centro del apósito con el centro de la herida. • Alisar bordes y utilizar un vendaje de sujeción o cinta. • Cambiarse en caso de fugas, sangrado, aumento de dolor y/o sospecha de infección. • Tiempo máximo de uso 7 días. • Retirar de manera atraumática. • Desechar de acuerdo a los protocolos clínicos locales. • No debe utilizarse en individuos con sensibilidad o que hayan presentado reacción alérgica al apósito o a sus componentes. • La esterilidad está garantizada a menos que el envase unitario esté dañado o abierto antes de su uso. • Temperatura de almacenamiento 10°C – 30°C.
Empaque secundario	Caja de cartón.
Empaque primario	Película – poliéster / polietileno transparente, inferior papel reforzado de 50um.
País de origen	E.U.A.
Vida útil	5 años.

Las copias impresas o respaldadas en algún medio externo al servidor de Boston Medical Device se consideraran copias no controladas (sólo para información) salvo que una leyenda impresa indique lo contrario.